


JOINSTAR CE SELBSTTEST 5er (COLLOIDAL GOLD)

zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben; CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung in Faltschachtel-Verpackung

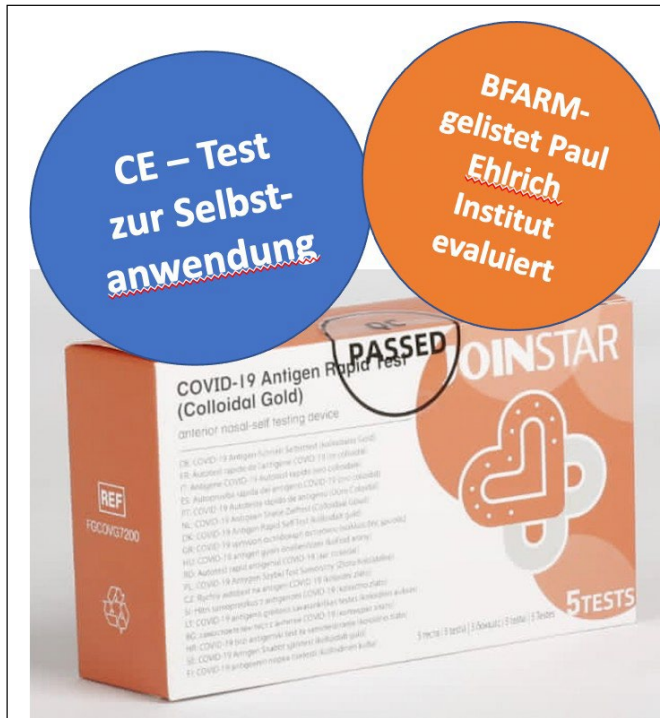

Produkt

Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) – CE: Jetzt auch CE-zertifiziert für die Eigenanwendung zum Verkauf in der gesamten EU (BfArM-Test-ID AT1276/21)

Technische Daten

Verpackt in Faltschachtel: 5 Test/Kit; VPE: 500 Test Kits

Verwendungszweck

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe

auf einem Polster das mit einem SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat beschichtet ist. Dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SARS-CoV-2-Antikörper in der Nachweiszone. Wenn die Probe SARS-CoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie(T) eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARSCoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie(C) immer eine farbige Linie, die anzeigt, dass ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden hat.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Extraktionspuffer
3. Steriler Tupfer (für die Probenentnahme)
4. Müllbeutel für Gefahrstoffe
5. Eine Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch

Lagerung und Haltbarkeit

1. Der Test ist 2 Jahre haltbar, wenn alle Teile in versiegelten Beuteln bei +2°C bis 30°C gelagert werden und die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.
2. Der Test sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel aufbewahrt werden. Frieren Sie den Test nicht ein und verwenden Sie ihn nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ Anterior-nasal (kurze Nase!)
- ✦ Spezifität: 99,2% Sensitivität: 96,1%
- ✦ Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Haltbarkeit: 2 Jahre
- ✦ BfArM gelistet
- ✦ PEI (Paul-Ehrlich-Institut) evaluiert
- ✦ CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

JOINSTAR CE SELBSTTEST 1er (COLLOIDAL GOLD): CE-zertifizierter Selbsttest zur Eigenanwendung

Corona-Schnelltest mit anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben

Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) - CE	CE zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung	anterior-nasale (kurze Nase!) Proben	Spezifität 99,2 %	Sensitivität 96,1%	Lagerung bei Raumtemperatur	Verpackt in Karton zu 5 Test Kits in Transportkartons zu 500 Tests (=100 5er Packungen)
--	---	--------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	---

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203