

COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex) "Spucktest"

zum nicht-invasivem qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel/Sputum- und Stuhlproben (bei Speichel/Sputum jeweils vom hinteren oropharyngealen Bereich)

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



Produktname

COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex)

Technische Daten

25 Stück / Packung, 1 Stück / Packung - gelistet vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Verwendungszweck

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Latex) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel-, Sputum- (jeweils vom im hinteren oropharyngealen Bereich) sowie Stuhlproben.

Bestandteile

1. Einweg-Pappbecher zur Speichel/Sputumsammlung
2. Coronavirus-Antigen-Testkassette
3. Probenahmerohr mit Verschlusskappe und **vorbefülltem** Extraktionspuffer
4. Tropfer

Lagerung und Haltbarkeit

1. Das Kit sollte bei 2 - 30 °C gelagert werden, die Haltbarkeit beträgt 12 Monate.
2. Bringen Sie den Test und die Probe vor der Prüfung auf Raumtemperatur (15°C – 30°C). Nach dem Auffüllen des Reagenziums sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ◆ Speichel/Sputum- und Stuhlproben können getestet werden
- ◆ Hohe Spezifität: 99,9% bei Speichel, Sputum oder Stuhl
- ◆ Hohe Sensitivität: 95% bei Sputum und Stuhl, 90,0% bei Speichel
- ◆ Leicht zu bedienen
- ◆ Schnelles Ergebnis in 15 Minuten
- ◆ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ◆ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- ◆ Test ist zur Heim- und Eigenanwendung (Selbsttest) in Österreich zugelassen! (entspricht zum Zeitpunkt der Datenblatterstellung der gesetzlichen Grundlage)

COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex)

Schnelltest zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Speichel/Sputum- und Stuhlproben

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung	Packungsgröße
COVID-19-Antigen Rapid Test (Latex)	CE	Speichel/Sputum - und Stuhlproben	99,9 %	90,0% bei Speichel, 95% bei Sputum und Stuhl	Bei Raumtemperatur	25 Tests pro Packung oder 1 Test pro Packung

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@Alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203